



A marca CE é uma marca de conformidade protegida da Comunidade Europeia. Os produtos aqui incluídos estão de acordo com os requisitos da Diretiva 98/79/CEE relativa a IVD.

Informações gerais

O detergente CLEANAC foi concebido para analisadores hematológicos automáticos Nihon Kohden.

PRECAUÇÕES

- Use luvas de proteção ao manusear o detergente CLEANAC.
- Não ingira o detergente. Em caso de ingestão, lave a boca imediatamente. Não force o vômito. Consulte um médico.
- Leia o manual do operador do analisador hematológico antes de usar este diluente.
- Leia cuidadosamente a Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de utilizar o diluente. A FDS é disponibilizada por nosso representante local.

Informações ambientais

Armazenamento

- Temperatura ambiente (1-30 °C)
- Conserve ao abrigo da luz solar

Funcionamento

- 15-30 °C

Data de validade

18 meses (incluindo o mês de fabricação)

Importador:

Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.

Rua Diadema, 89, 1º andar, conjuntos 11 a 17, Mauá São Caetano do Sul/ São Paulo, CEP 09580-670 - Brasil

CNPJ: 14.365.637/0001-96

Tel.: +55 (11) 3044-1700

e-mail: qualidade@nkbr.com.br

Fabricante Legal:

Nihon Kohden Corporation

1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-Ku Tóquio, Japão 161-8560

<http://www.nihonkohden.com/>

Cadastro ANVISA MS: 80914690020

Resp. Técnico: Fábio Alexandre de Jesus CRF-SP N. 39.549

Revisão Brasil: 00 de 04.2018



NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan
Phone +81 3-5996-8036 Fax +81 3-5996-8100

NIHON KOHDEN SINGAPORE PTE LTD
1 Maritime Square, #10-34 HarbourFront Centre Singapore 099253
Phone +65 6376-2210 Fax +65 6376-2264

NIHON KOHDEN KOREA, INC.
5F Miso Bldg. 890-47 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-280 Korea
Phone +82 2-3273-2310 Fax +82 2-3273-2352