



A marca CE é uma marca de conformidade protegida da Comunidade Europeia. Os produtos aqui incluídos estão de acordo com os requisitos da Diretiva 98/79/CEE relativa a IVD.

## Informações gerais

O detergente CLEANAC foi concebido para analisadores hematológicos automáticos Nihon Kohden.

### PRECAUÇÕES

- Use luvas de proteção ao manusear o detergente CLEANAC.
- Não ingira o detergente. Em caso de ingestão, lave a boca imediatamente. Não force o vômito. Consulte um médico.
- Leia o manual do operador do analisador hematológico antes de usar este diluente.
- Leia cuidadosamente a Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de utilizar o diluente. A FDS é disponibilizada por nosso representante local.

## Informações ambientais

### Armazenamento

- Temperatura ambiente (1-30 °C)
- Conserve ao abrigo da luz solar

### Funcionamento

- 15-30 °C

## Data de validade

18 meses (incluindo o mês de fabricação)

### Importador:

Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.

Rua Diadema, 89, 1º andar, Térreo, Mauá

São Caetano do Sul/ São Paulo, CEP 09580-670 - Brasil

CNPJ: 14.365.637/0001-96

Tel.: +55 (11) 3044-1700

e-mail: qualidade@nkbr.com.br

**ANVISA MS:** 80914690020

Resp. Técnico: Sabrina Gonçalves Lima Jardim - CRF-SP  
N. 51.083

**Revisão Brasil:** 00 de 04.2018\_2



NIHON KOHDEN CORPORATION  
1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan  
Phone +81 3-5996-8036 Fax +81 3-5996-8100

NIHON KOHDEN SINGAPORE PTE LTD  
1 Maritime Square, #10-34 HarbourFront Centre Singapore 099253  
Phone +65 6376-2210 Fax +65 6376-2264

NIHON KOHDEN KOREA, INC.  
5F Miso Bldg, 890-47 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-280 Korea  
Phone +82 2-3273-2310 Fax +82 2-3273-2352